

D-F 30

Desinfektion mit Breitbandwirkung



Beschreibung

- D-F 30 desinfiziert Oberflächen und Inventar in z.B. Krankenhäuser, Arztpraxen, Tierarztpraxen, Sonnenstudios
- dient zusätzlich zur Desinfektion von Oberflächen in der Lebensmittelbranche
- bestens geeignet zur Desinfektion nach HACCP Verfahren
- Wirkungsspektrum: unbehüllte und behüllte Viren, z.B Polio, ECBO, Adeno, Influenza, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Noro

Anwendung

- Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis
Bakterien: 2 % - 15 min; 1 % - 60 min; 0,5 % 240 min
Tuberkulose: 5 % - 30 Min, Viruzidie (inkl. HIV, HBV, HCV) gem. VAH Empfehlung:
5 % - 15 min
4 % - 60 min
Behälter immer zuerst mit kaltem Leitungswasser füllen und dann D-F 30 zugeben.
Alle Flächen und Gegenstände, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, sind nach dem Desinfektionsvorgang (Einwirkzeit beachten !) mit Trinkwasser nachzuspülen.
Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Produktinformation und Kennzeichnung lesen.
BAUA-Nr. N-76170

Vorteile

- DVG- und VAH- gelistet
- frei von Formaldehydabspaltern und Formaldehyd
- niedrige Anwendungskonzentration
- schneller Wirkungseintritt

Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.